


見守り 新鮮情報

事例1 カタログ販売で**60cc用**と記載してあった**失禁用パンツ**を購入。使用したら思っていたものと違い、**しみ出てしまった**。
(70歳代 女性)


事例2 折り込み広告で見た**尿漏れパンツ5枚セット**を購入し1枚使用した。「**15~20cc**に対応する」とのことだが、自分ではそんなに尿を出していないと思うのにズボン下まで尿が**しみ出した**。

(70歳代 女性)

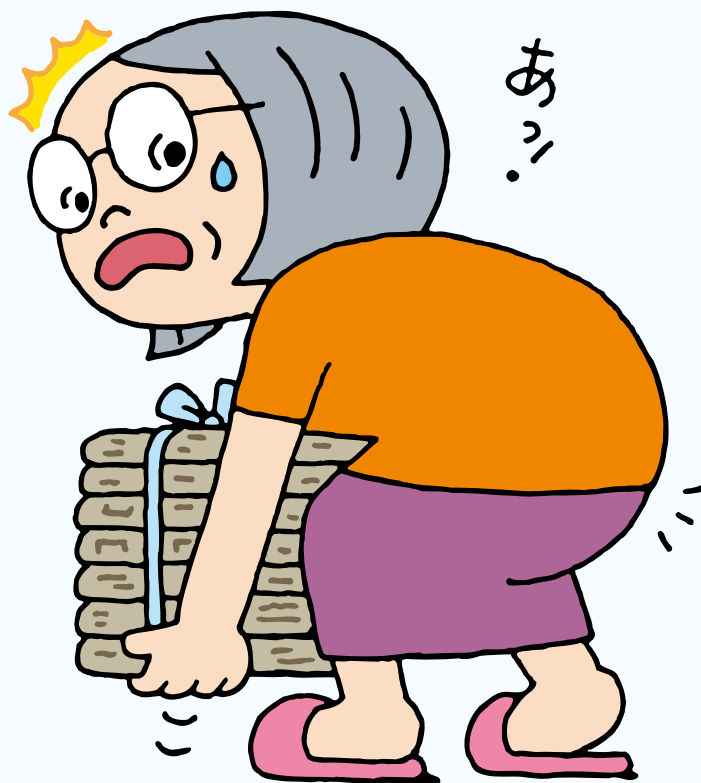

失禁パンツ 過信は禁物、しみ出すことも

ひとこと助言

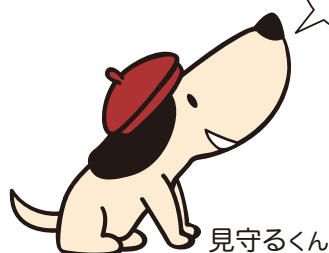

見守るくん

適した用品を
選択しよう

- 少量の失禁尿を吸収することをうたった、洗濯して繰り返し使える布製の下着「失禁パンツ」についてテストしたところ、表示より少ない尿の量でもしみ出す傾向が見られました。
- 尿漏れケア用品にはパンツ型の紙おむつ、失禁パンツ、パッド等があります。まずは、自分の尿漏れの量や頻度等の症状をきちんと把握した上で、適した用品を選択しましょう。
- 失禁パンツを選ぶ場合は、販売店等に、どのようなタイプの、どの程度の尿漏れに対応できるのかを確かめ、まずは少数枚で、サイズが合っているか、自分のニーズに合っているかを確認しましょう。